

Bedienpanel am Hub- und Transportwagen



Fahren, Heben, Senken, Be- und Entladen. Alle Funktionen können über ein zentrales Bedienpanel gesteuert werden.

Über den Hauptschalter (1) wird das Bedienpanel ein- bzw. ausgeschaltet.

Mittels der beiden vor/zurück-Tasten kann die Antriebsrolle am Hub- und Transportwagen nach vor (2) und wieder zurück (3) gesteuert werden. Über die Heben- (4) und Senken-Tasten (5) kann der Wagen nach oben gefahren und wieder gesenkt werden.

Mit den Pfeiltasten (6) kann der Hub- und Transportwagen vor- und zurückgefahren werden. Die Geschwindigkeit wird über das Handrad (7) vorgewählt und kann mithilfe des Handgriffs (9) zusätzlich präzise gesteuert werden.

Der elektrische Fahr Antrieb beinhaltet zudem einen Sicherheitsschalter (8) am Bedienpanel mit automatischer STOPP-Funktion, um ein Einquetschen des Bedieners zu verhindern.

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical