

Anatomie Seziertische

Typ: AST 10/700 und AST 10/700-H

Bedienungs- und Montageanleitung

Inhalt

1 Installationsbereich	3
2 Allgemeiner Betrieb.....	4
2.1 Höhenverstellung bei Anatomie Seziertisch AST 10/700-H	4
2.2 Allgemeine Hinweise.....	4
3 Ersatzteilliste	4
4 Pflegehinweise für Edelstahloberflächen	4
4.1 Allgemeine Pflegeanweisungen für Edelstahl	4
4.2 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende Maßnahmen	5
4.3 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel.....	5
4.3.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger	5
4.3.2 Geeignete Reinigungsmittel.....	5
4.3.3 Entkalken	5
4.3.4 Bürsten / Schleifvlies.....	6
4.3.5 Textilien	6
5 Technische Zeichnungen AST 10/700 und AST 10/700-H	7
6 Konformitätserklärung.....	10

Bedienungs- und Montageanleitung

1 Installationsbereich

Der Seziertisch wird direkt auf dem fertigen Fußboden montiert. Prüfen Sie mittels einer Wasserwaage ob der Fußboden eben bzw. waagrecht ist. Falls der Fußboden uneben oder schräg ist, müssen Sie den Sockel des Seziertisches mit Blechstreifen unterlegen bzw. ausgleichen. Achten Sie darauf, dass der Seziertisch in Längs- und Querrichtung eben ausgerichtet ist und der Sockel sauber aufliegt.

Öffnen Sie die Revisionsöffnung am Sockel des Tisches.

Bohren Sie 4 Löcher $d=12$ mm mind. 150 mm tief für die Befestigung des Tisches.

Verwenden Sie die beiliegenden Schwerlastdübel M 12 x 125 oder M12 x 160 mm (je nach Bodenaufbau). Ziehen Sie die 4 Dübel gleichmäßig fest und kontrollieren Sie anschließend nochmals die Position des Seziertisches mit der Wasserwaage. (Alternativ können auch vorab 4 Gewindestangen M 12 einbetoniert werden, der Tisch ist dann mit 4 Muttern M12 zu befestigen)

Verbinden Sie die Warm- und Kaltwasseranschlüsse mit den mitgelieferten flexiblen Schläuche mit der Kniehebelsmischbatterie. Achten Sie darauf, dass der Warmwasseranschluss an der Kniehebelsmischbatterie links, der Kaltwasseranschluss rechts ist.

Schließen Sie nur den flexiblen Abwasserschlauch DN 50 an den Abwasserschluss des Tisches an. Das andere Ende des Schlauches verbinden Sie mit dem bauseitigen Anschluss. Verwenden Sie ggf. ein HT-Rohrstück oder Adapterstück (je nach bauseitiger Ausführung des Abwasseranschlusses). Bevor Sie den Abwasserschlauch auf den bauseitigen Anschluss montieren, fertigen Sie eine Schleife mit dem Schlauch an; diese Schleife dient als Siphon für den Tisch. Zur Befestigung des Abwasserschlauches verwenden Sie die beiden Drahtklemmen.

Klemmen Sie nur das Stromkabel an der Abzweigdose des Tisches an. (Spannung 230 Volt 50/60Hz). Klemmen Sie das Kabel für den potentialfreien Ausgleich mit der Schraube M8 an der Bodenplatte fest. Der Seziertisch ist bereits vorinstalliert, so dass Sie nur die Stromzuführung anklemmen müssen. Bitte beachten Sie, dass diese Arbeiten nur von einem **autorisierten Elektroinstallateur ausgeführt** werden dürfen.

Überprüfen Sie nach Abschluss dieser Montagearbeiten alle Verbindungsleitungen auf Dichtheit sowie auf einwandfreie Funktion. Achten Sie insbesondere darauf, dass kein Schlauch oder Kabel eingeklemmt wird wenn der Tisch nach oben bzw. nach unten bewegt bzw. gedreht wird.

Überprüfen Sie anschließend noch die Kniehebelsmischbatterie auf Funktion. Die Mischbatterie wird von rechts nach links geöffnet, in der rechten Stellung fließt nur Kaltwasser, mittig gemischtes Kalt- und Warmwasser sowie ganz links nur heißes Wasser.

Überprüfen Sie zum Schluss noch den einwandfreien Ablauf des Abwassers. Verschließen Sie den Ablauf des Waschbeckens mit dem mitgelieferten Standrohr und füllen anschließend das ganze Waschbecken mit heißem Wasser. Danach ziehen Sie das Standrohr aus dem Becken und beobachten ob das Wasser einwandfrei abfließt.

Überprüfen Sie nochmals alle Verbindungsleitungen des Abwassers auf Dichtigkeit. Anschließend ist der Tisch betriebsbereit.

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon +49 941/20 86 48-0
Telefax +49 941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Bedienungs- und Montageanleitung

2 Allgemeiner Betrieb

Vorne am Tisch wird eine Leichenmulde eingeschoben indem man die grün eingezeichnete Klappe hochzieht und heruntergeklappt.

2.1 Höhenverstellung bei Anatomie Seziertisch AST 10/700-H

Das Heben des Anatomie Seziertisches erfolgt durch gleichmäßiges Pumpen des Fußpedals an der Hydraulikpumpe nach unten, das Absenken durch Anheben des Fußpedals.

Die Höhenverstellung des Tisches dient nur zur Einstellung der optimalen Arbeitshöhe des Benutzers. Eine andere Benutzung des Seziertisches z.B. zur Verwendung als Hubvorrichtung zum Heben von anderen Lasten ist nicht zulässig.

Bei Verstoß erlöschen die Betriebserlaubnis sowie jeglicher Gewährleistungsansprüche.

2.2 Allgemeine Hinweise

Der Seziertisch ist absolut wartungsfrei. Die Wartung beschränkt sich auf folgende Punkte:

- Regelmäßige Reinigung des kompletten Tisches
- Regelmäßige Reinigung der Abflussleitungen
- Regelmäßige Kontrolle des Brauseschlauches und Brausekopf auf Dichtheit
- Regelmäßige Kontrolle der Kniehebelmischbatterie auf Funktion
- Regelmäßige Kontrolle aller Anschlussleitungen auf Dichtheit
- Regelmäßige Kontrolle der Elektroanschlüsse

3 Ersatzteilliste

Bezeichnung	Artikelnummer
Schuko-Einbausteckdose Ausführung Deutschland (ggf. Länderabhängig)	060.011.022
Taster für Seziertisch	010.010.006
Brauseschlauch 1/2" Länge 3,0 m	010.010.015
Handbrause gebogene Ausführung	010.010.013
Kniehebelmischbatterie 1/2"	010.010.007

4 Pflegehinweise für Edelstahloberflächen

4.1 Allgemeine Pflegeanweisung für Edelstahl

Die besten Nachrichten rund um die Reinigung und Pflege von Edelstahl sind die, dass Edelstahl nur sehr wenig Pflege benötigt und Verunreinigungen meist einfach zu entfernen sind.

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon +49 941/20 86 48-0
Telefax +49 941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■■■■

Bedienungs- und Montageanleitung

4.2 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende Maßnahmen

Nach dem Einbau und/oder der Montage von Geräten bzw. Möbeln aus Edelstahl muss eine Erstreinigung durchgeführt werden, damit eventuelle Verschmutzungen durch Lagerung, Transport oder Montagerückstände entfernt werden.

Schutzfolien oder Verpackungen aus Papier bzw. Rückstände von Haftklebern müssen nach Aufbau der Montage vollständig entfernt werden, da sie zur Korrosion führen können. Zur Reinigung dürfen nur geeignete Reinigungsmittel (siehe unten) verwendet werden. In der Regel wird das entsprechende Reinigungsmittel mit einem Mikrofasertuch auf der Oberfläche gleichmäßig verteilt. Hartnäckige Verschmutzungen werden intensiver bearbeitet, z. B. mit einem weichen Kunststoffvlies.

Danach werden Reinigungsrückstände mit klarem Wasser abgespült bzw. abgewaschen und die Flächen mit weichen Tüchern abgetrocknet.

Schwerlösliche Rückstände oder kleine Kratzer können mit einem geeigneten Nylon-Schleifvlies weggearbeitet werden.

4.3 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel

Diese können unter der Beachtung der Anwendungshinweise des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers verwendet werden.

4.3.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger

Edelstahl Pflegemittel – Spezialpflege- und Schutzmittel für Edelstahl. 400 ml Spraydose.
Artikel Nr.: 060.010.001

Vor dem Gebrauch Spraydose kräftig schütteln, aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen, trockenen Tuch gründlich abwischen. Anschließend gegebenenfalls sterilisieren/desinfizieren.

4.3.2 Geeignete Reinigungsmittel

Edelstahl-Teile sollten grundsätzlich nur mit basischen Reinigungsmitteln behandelt werden.

Das Reinigungsmittel muss auf jeden Fall frei von Salzsäure und chlorhaltigen Mitteln, etc. sein, was zu Verfärbungen führen kann.

4.3.3 Entkalken

Hierfür handelsübliche, für Edelstahl geeignete Entkalkungsmittel verwenden.

Bedienungs- und Montageanleitung

4.3.4 Bürsten / Schleifvlies

Bürsten mit Natur-, Kunststoffborsten.

Artikel	Artikel Nr.	Körnung	Maße
Nylon-Schleifvlies fein	060.010.002	P 1000	L x B: 200 x 115mm
Nylon-Schleifvlies grob	060.010.003	P 280	L x B: 200 x 115mm

Anwendungshinweise:

Zu beachten, sofern es sich um eine geschliffene Oberfläche handelt:


Immer in Richtung des bereits vorhandenen Schleifbildes arbeiten, nie quer dazu.

4.3.5 Textilien

Textilmaterial aus Natur- und Chemiefasern.

Sehr gut geeignet sind Reinigungstextilien aus Mikrofasern, um Griffspuren von Edelstahloberflächen zu entfernen.

Artikel	Artikel Nr.	Material	Maße
Mikrofasertuch	060.010.005	80% Polyester 20% Polyamide	L x B: 400 x 400 mm

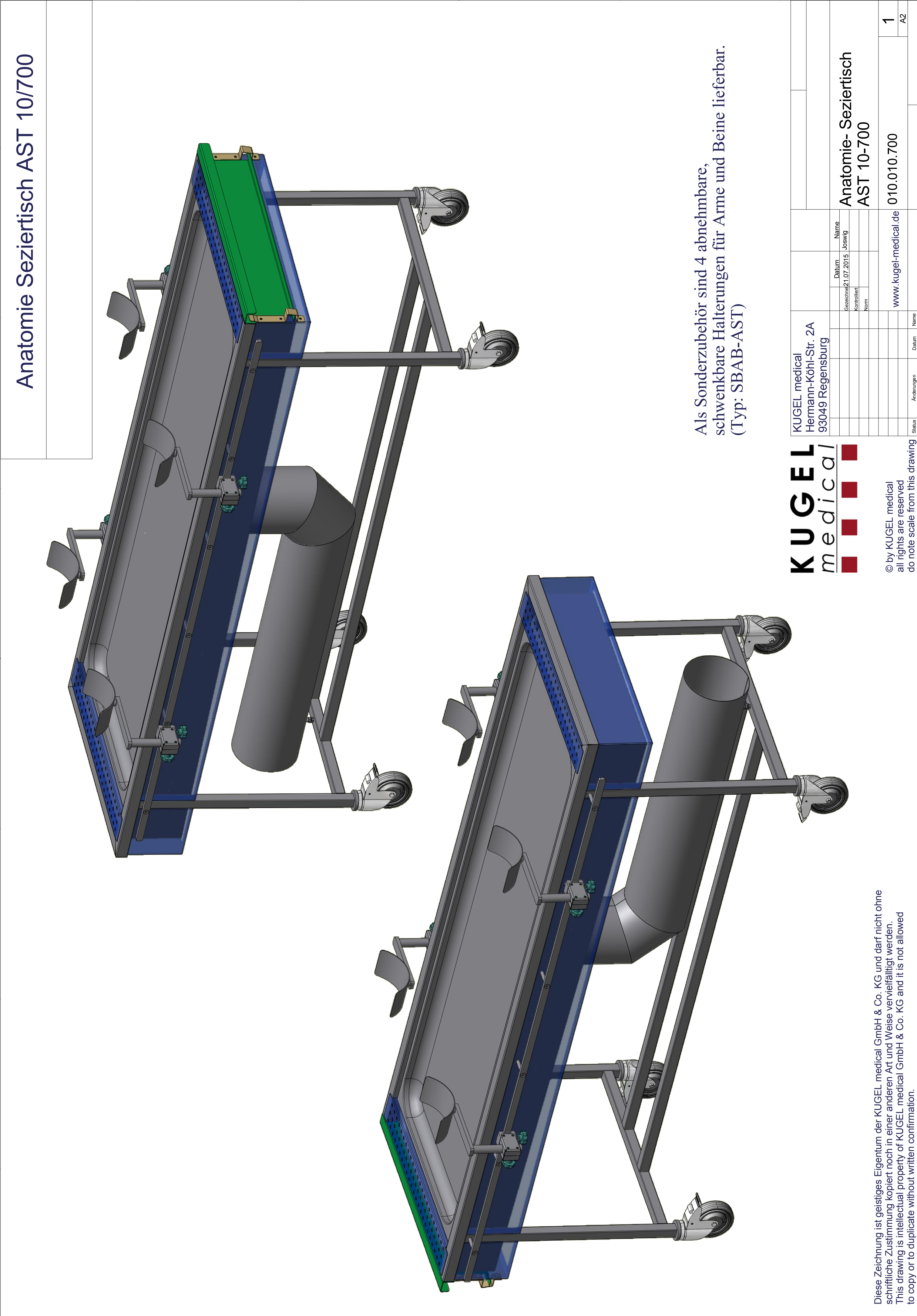

Anatomie Seziertisch AST 10/700







Als Sonderzubehör sind 4 abnehmbare, schwenkbare Halterungen für Arme und Beine lieferbar. (Typ: SBAB-AST)



© by KUGEL medical
all rights are reserved
do note scale from this drawing

KUGEL medical											
Hermann-Köhl-Str. 2A											
93049 Regensburg											
					Datum	Name					
					Gezeichnet	21.07.2015		Joswig			
					Kontrolliert						
					Norm						
									Anatomie- Seziertisch AST 10-700		
									010.010.700		
									1		
									A2		
Status	Änderungen	Datum	Name						1		
	3						2				


Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der KUGEL medical GmbH & Co. KG und darf nicht ohne schriftliche Zustimmung kopiert noch in einer anderen Art und Weise vervielfältigt werden.
This drawing is intellectual property of KUGEL medical GmbH & Co. KG and it is not allowed to copy or to duplicate without written confirmation.

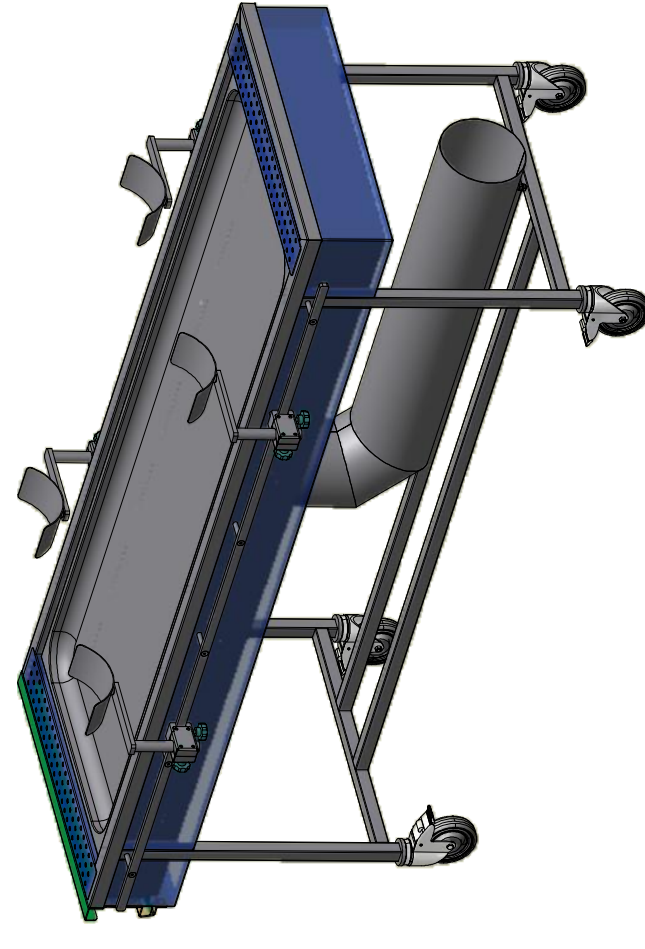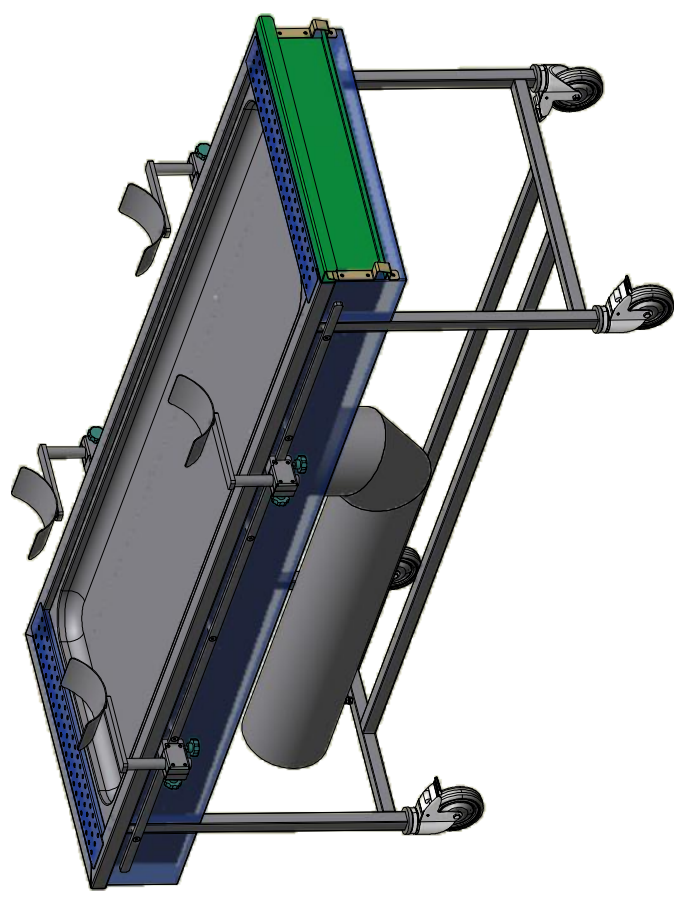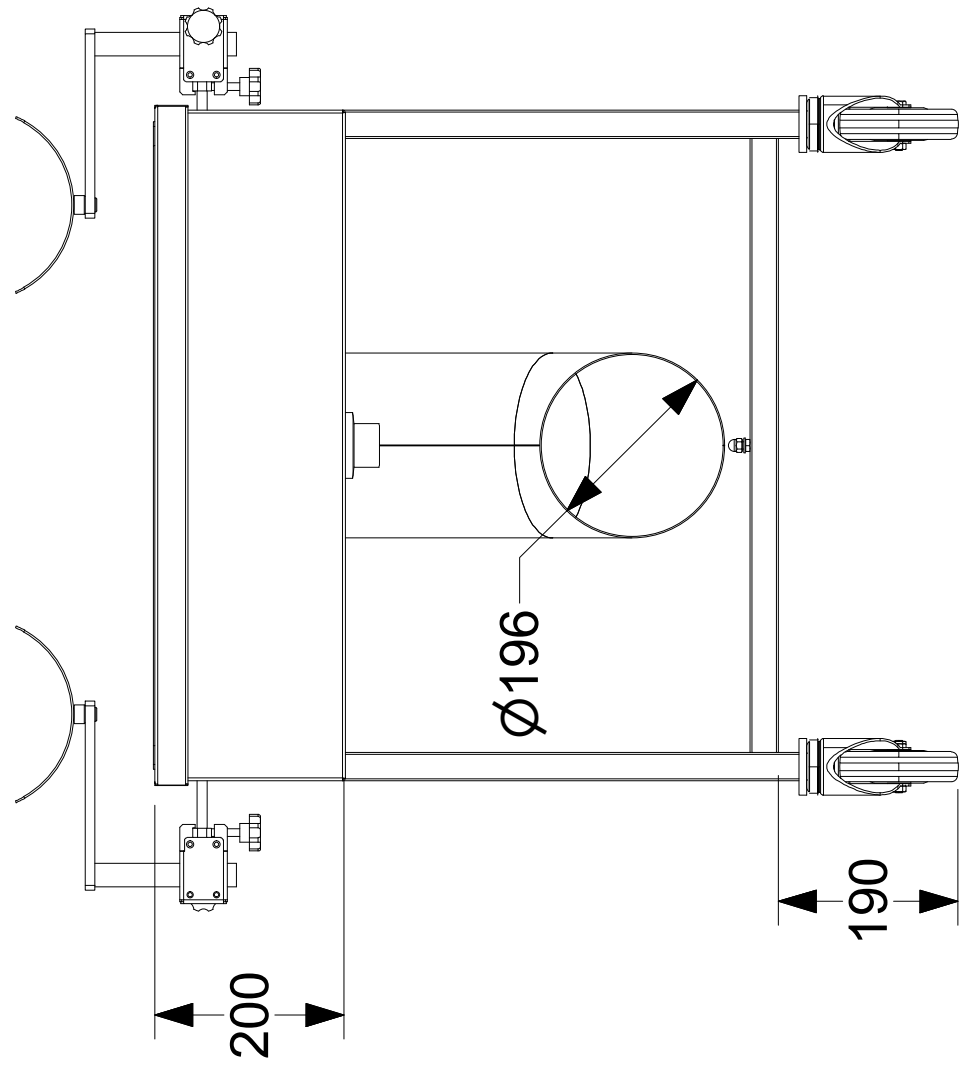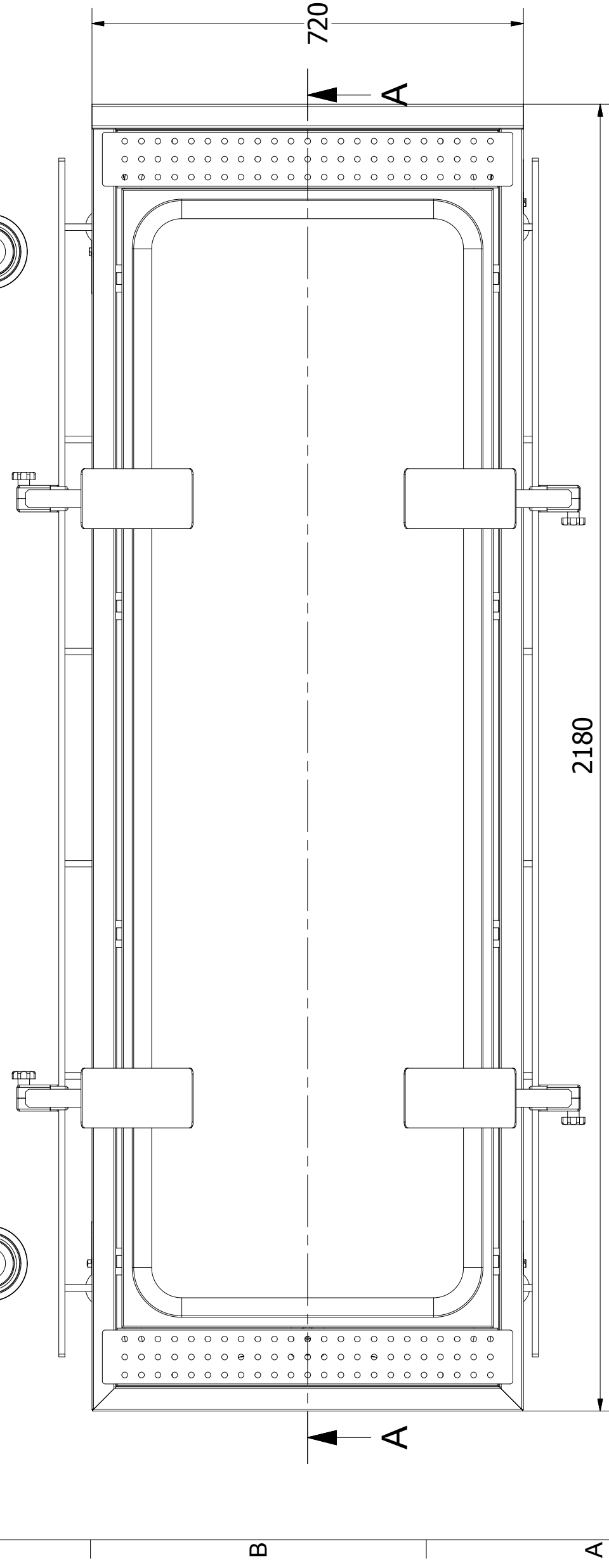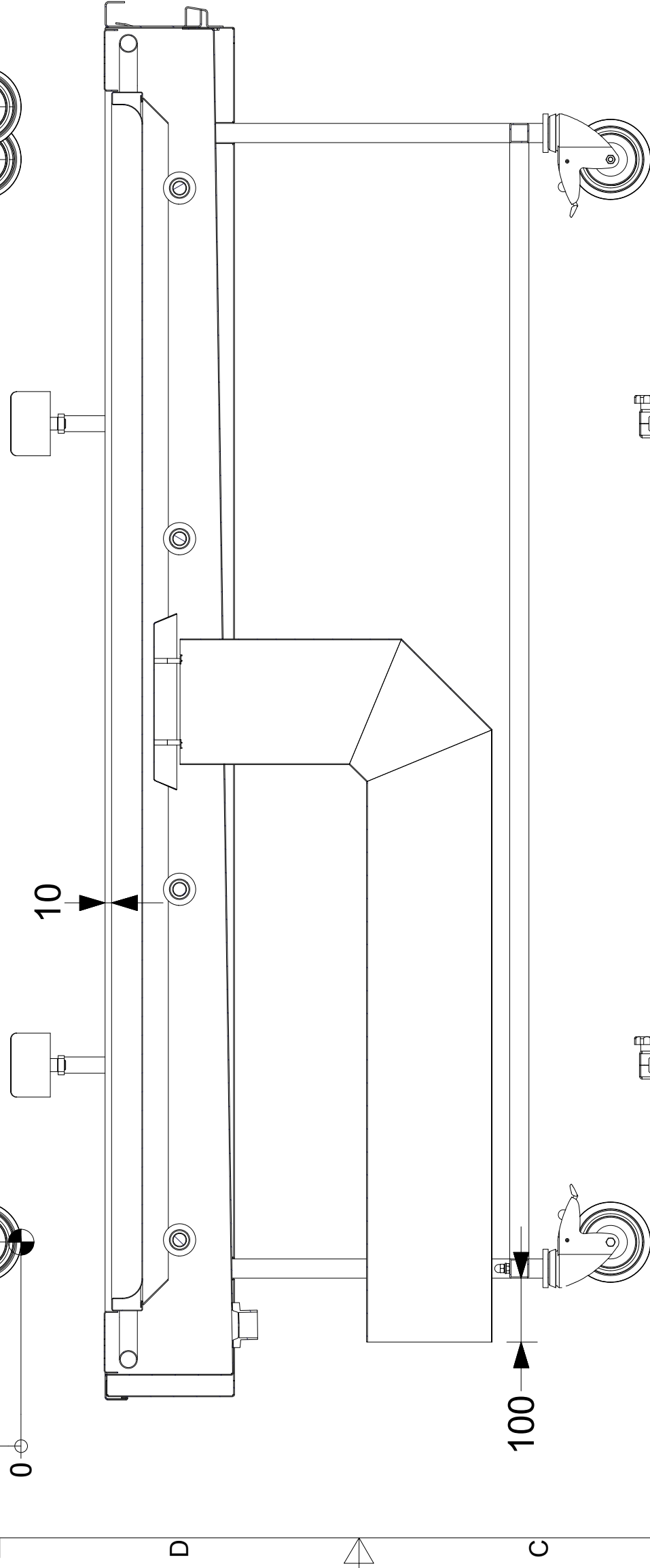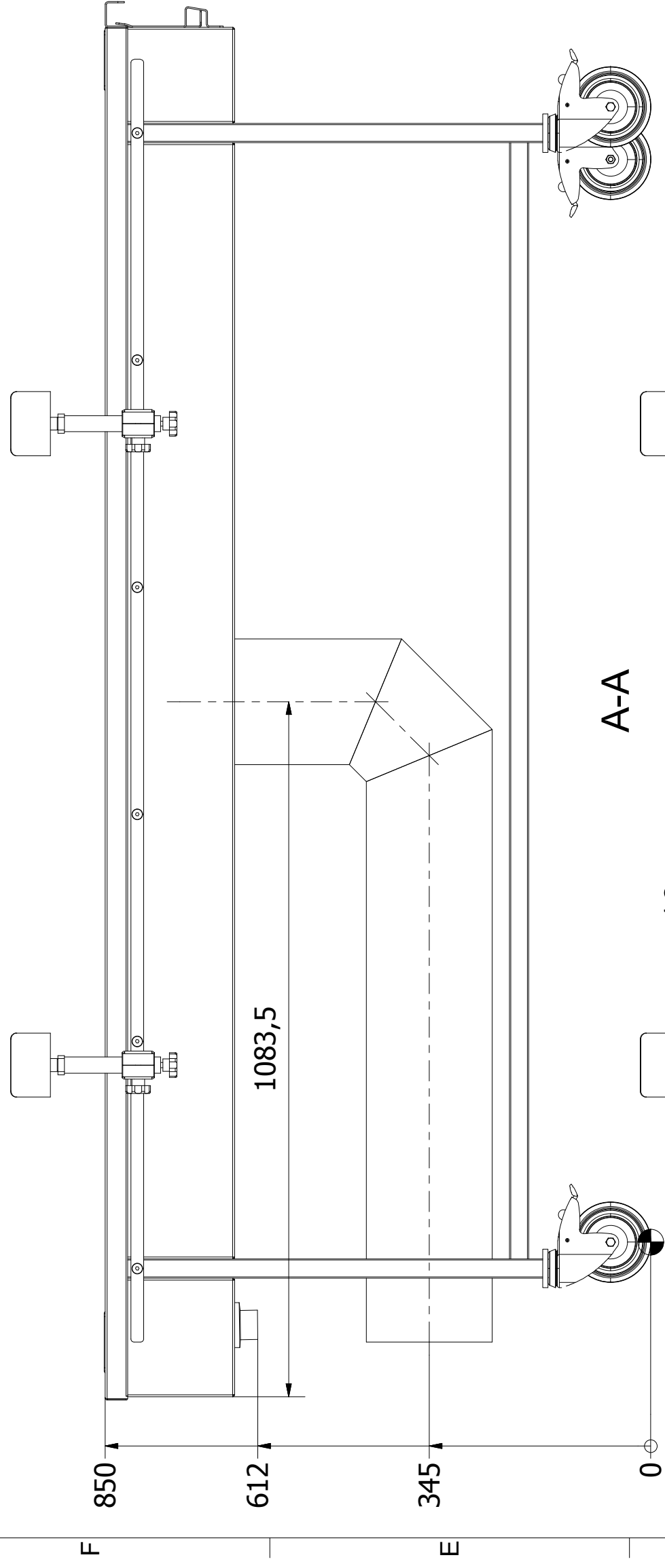

This drawing is intellectual property of KUGEL medical GmbH & Co. KG and it is not allowed to copy or to duplicate without written confirmation.

[illegible]

Anatomie Seziertisch AST 10/700-H

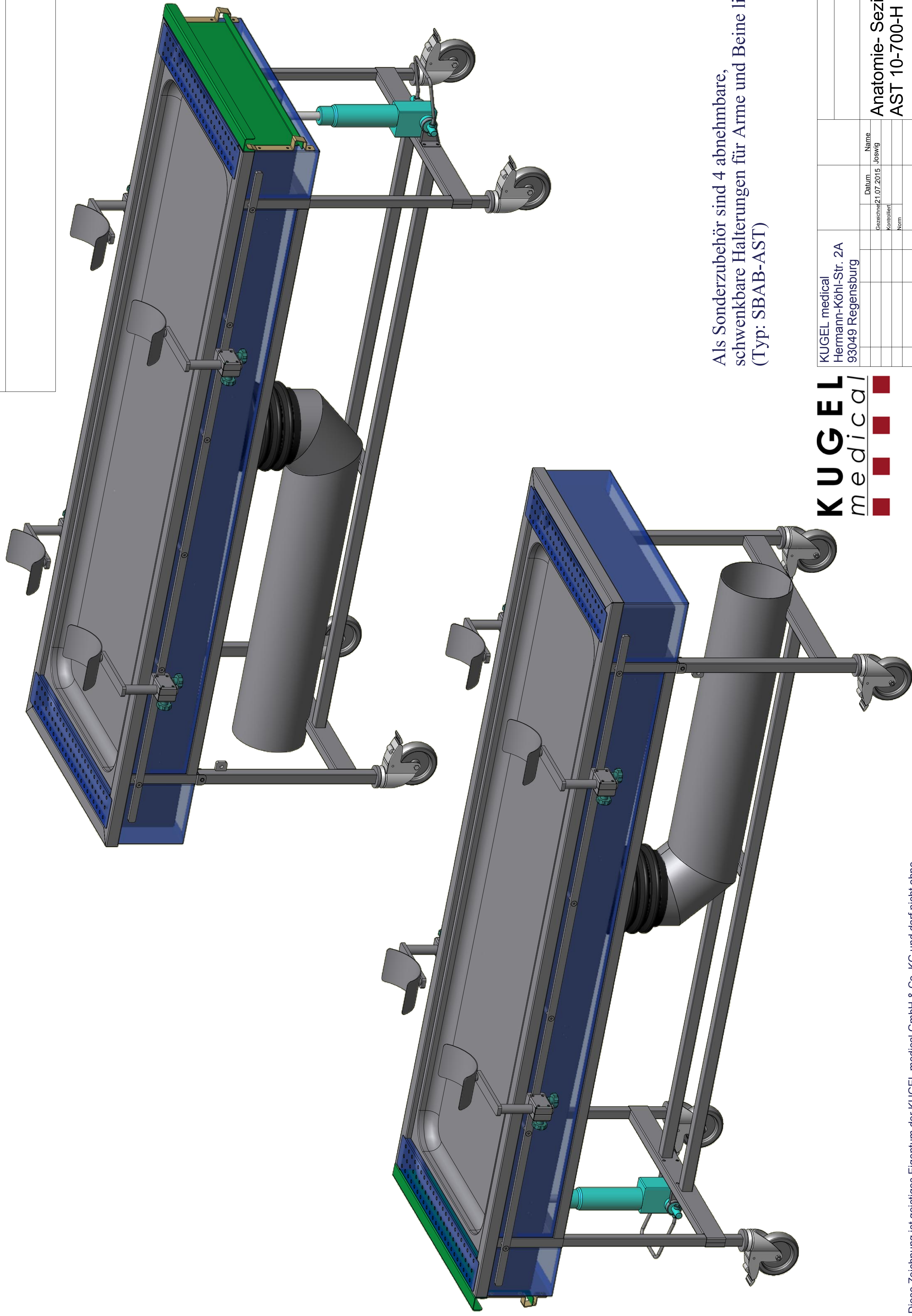

Als Sonderzubehör sind 4 abnehmbare, schwenkbare Halterungen für Arme und Beine lieferbar.
(Typ: SBAB-AST)


KUGEL
medical

This drawing is intellectual property of KUGEL medical GmbH & Co. KG and it is not allowed to copy or to duplicate without written confirmation.

KUGEL medical Hermann-Köhl-Str. 2A 93049 Regensburg				Datum	Name	Anatomie- Seziertisch AST 10-700-H	1	A2	1
				Gezeichnet	21.07.2015	Joswig			
				Kontrolliert					
				Norm					
							010.010.705		
							www.kugel-medical.de		
Status	Änderungen	Datum	Name						3 2 1

© by KUGEL medical
all rights are reserved
do not scale from this

all rights are reserved
do not scale from this drawing

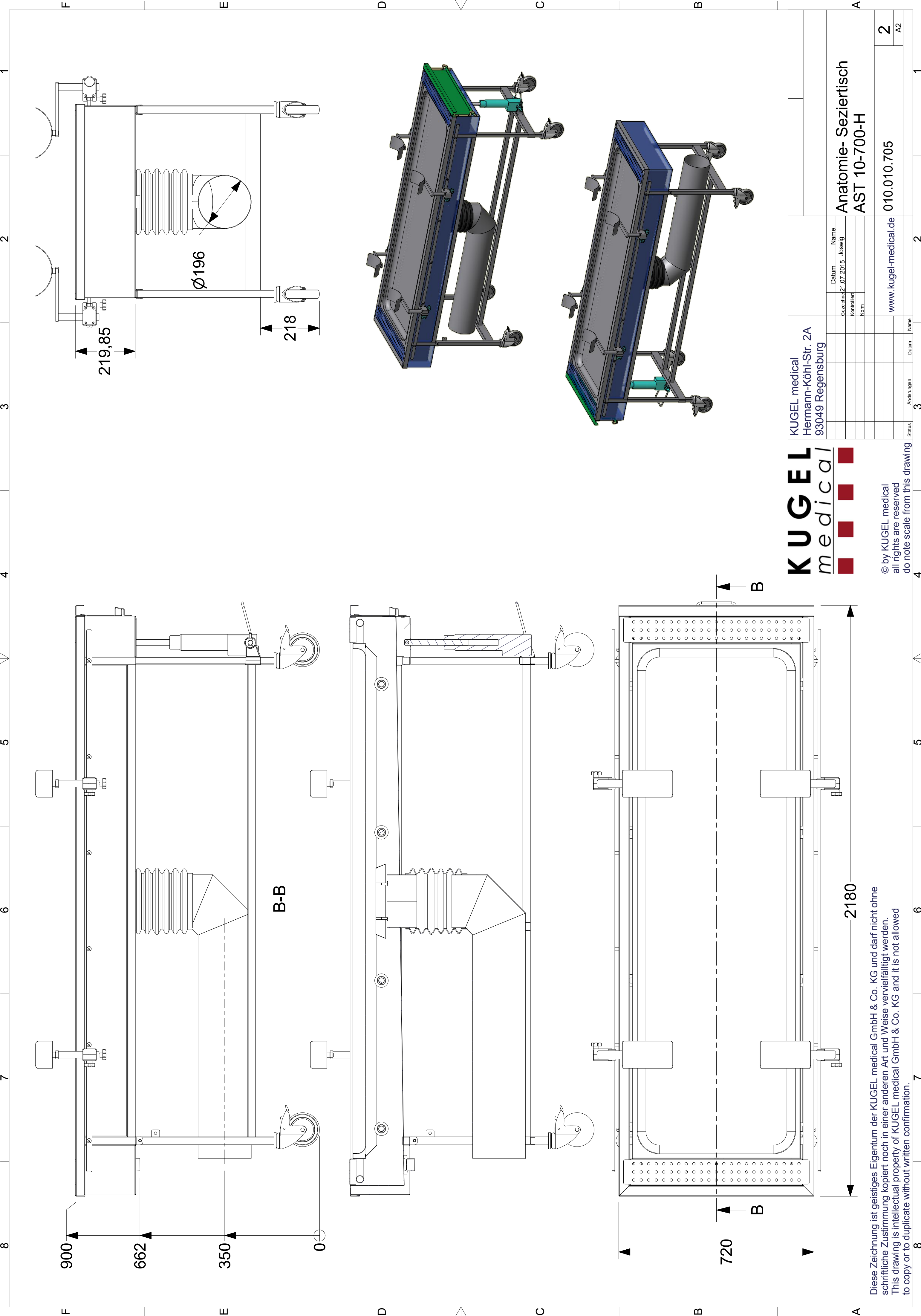

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der KUGEL medical GmbH & Co. KG und darf nicht ohne schriftliche Zustimmung kopiert noch in einer anderen Art und Weise vervielfältigt werden.
This drawing is intellectual property of KUGEL medical GmbH & Co. KG and it is not allowed to copy or to duplicate without written confirmation.

KUGEL medical Hermann-Köhl-Str. 2A 93049 Regensburg		Gezeichnet21.07.2015		Datum		Name	
		Kontrolliert					
		Norm					
Status	Änderungen	Datum	Name				
	3		2				
Anatomie- Seziertisch AST 10-700-H				010.010.705		2	A2
www.kugel-medical.de							



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY
--

Wir KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Straße 2A
93049 Regensburg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Geräteart:	Seziertische
------------	--------------

Typenbezeichnung:	ST 10/100, ST 10/150, ST 10/200, ST 10/300, ST 10/350 ST 10/400, ST 10/500, STV 10/100, STV 10/150, STV 10/300, STV 10/800, STV 10/850, AST 10/700, AST 10/700-H
-------------------	---

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder
normativen Dokument(en) übereinstimmt:

Technische Vorschriften:	2006/42/EG, DIN EN 954, EN 60 204-1, DIN EN 349 VDE 0100
--------------------------	---

Regensburg, den 02.05.2018

Unterschrift