

Staubabsaugung Set für Autopsiesäge HB 740

Bedienungsanleitung

Inhalt

1 Lieferumfang	3
2 Sicherheitshinweise	3
2.1 Symbolerklärung	3
2.2 Sicherheitshinweise	4
3 Montage	5
3.1 Montage Absaugglocke	5
3.2 Montage Sägeblatt	6
4 Reinigung und Wartung	6
5 Zubehör/Ersatzteile	7
6 Gewährleistung	8
7 Umweltschutz	8
8 Kundendienst-Adresse	8
9 Konformitätserklärung	9

Bedienungsanleitung

1 Lieferumfang

- Staubsauger für Autopsiesäge HB 740
- Vliesfiltertüten (5 Stück)
- Schlauch komplett
- Autopsiesäge HB 740
- Absaugglocke
- Werkzeug
- Gebrauchsanweisung
- Aufhängung für Autopsiesäge HB 740 mit Griff, höhenverstellbar
- Rundes Sägeblatt, d= 65mm
- Tiefensägeblatt, schmal
- Tiefensägeblatt, breit
- Schlüsselpaar zum Auswechseln der Sägeblätter

2 Sicherheitshinweise

2.1 Symbolerklärung



Sicherheitshinweis



Zusätzliche Informationen

Bedienungsanleitung

2.2 Sicherheitshinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Gerät ist bestimmt zum Absaugen von feinem, trockenem Sägestaub.



Beim Saugen darf niemals der Filter entfernt werden!



Keine Schilder und Zeichen auf das Gerät nieten oder schrauben!

Die Schutzisolierung kann dadurch unwirksam werden. Empfohlen werden Klebeschilder.



Nur unbeschädigte Stecker und Kabel verwenden!

Überprüfen sie Kabel und Stecker regelmäßig.



Netzspannung und Spannungsangabe am Gerät müssen Übereinstimmen!



Nur Original Zubehör verwenden!



Persönliche Schutzausrüstung tragen, Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe!




Das Gerät darf in explosionsgefährdeten Bereichen nicht betrieben werden.

Bedienungsanleitung

3 Montage

3.1 Montage Absaugglocke


- Pos.1 auf Pos.3 aufstecken und mit Pos. 2 festschrauben.
- Pos. 5 (Dichtring) auf Pos. 4 stülpen und Bajonettverschluss einfetten.
- Pos. 1 mit Pos. 4 über den Bajonettverschluss verbinden.

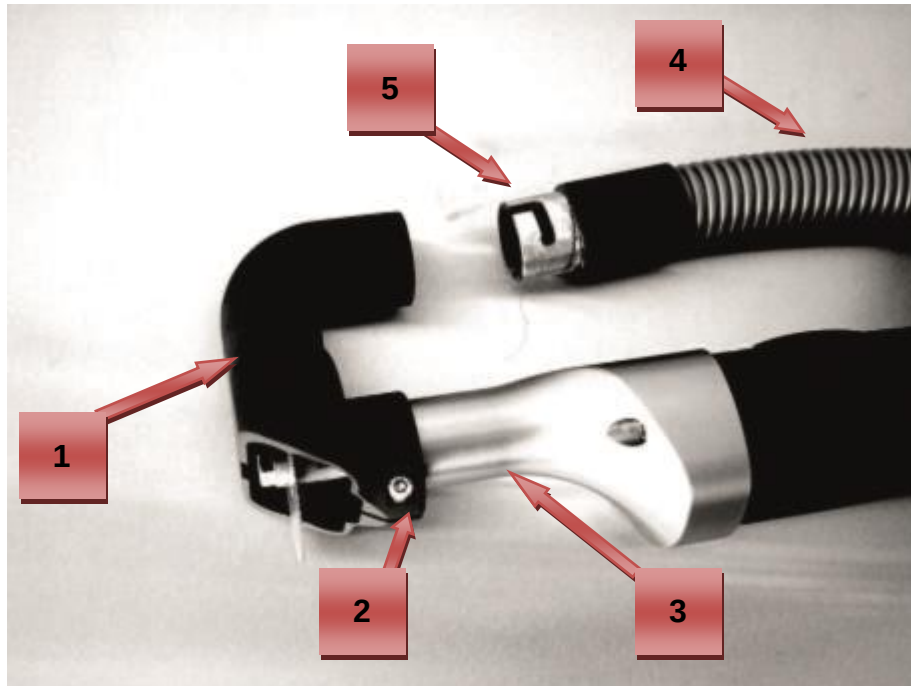

Bedienungsanleitung

3.2 Montage Sägeblatt

- Sägeblatt aufsetzen und mit der Schraube von Hand leicht anziehen.
- Gabelschlüssel an Welle ansetzen zum kontern.
- Mit Steckschlüssel die Schraube anziehen.

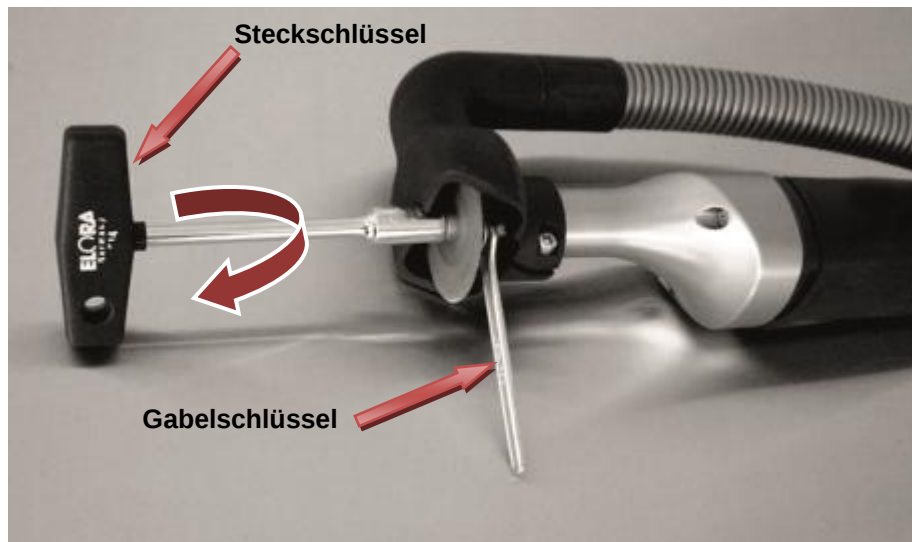

Beim Wechseln des Sägeblattes immer beide Schlüssel verwenden!
Steckschlüssel zum anziehen und Gabelschlüssel zum kontern der Schraube.

4 Reinigung und Wartung



Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen.



Instandsetzung dürfen nur durch zugelassene Kundendienststellen oder durch Fachkräfte für dieses Gebiet, welche mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind, durchgeführt werden.



Sicherheitsüberprüfungen nach den örtlich geltenden Vorschriften für ortsveränderliche gewerblich genutzte Geräte beachten.



Bajonettverschluss zwischen Absaugglocke und Saugschlauch muss immer mit dem Original Spezialfett leicht eingefettet sein.

Bedienungsanleitung



Bajonettverschluss sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt und neu eingefettet werden.




Der Dichtungsring sollte in regelmässigen Abständen auf Risse und Deformierungen überprüft werden. Nie ohne Dichtungsring arbeiten.



Motorschutzfilter alle 3 Monate austauschen (kann sonst zu Saugverlust führen oder Beschädigung der Saugturbine).



Abluftfilter einmal Jährlich austauschen.

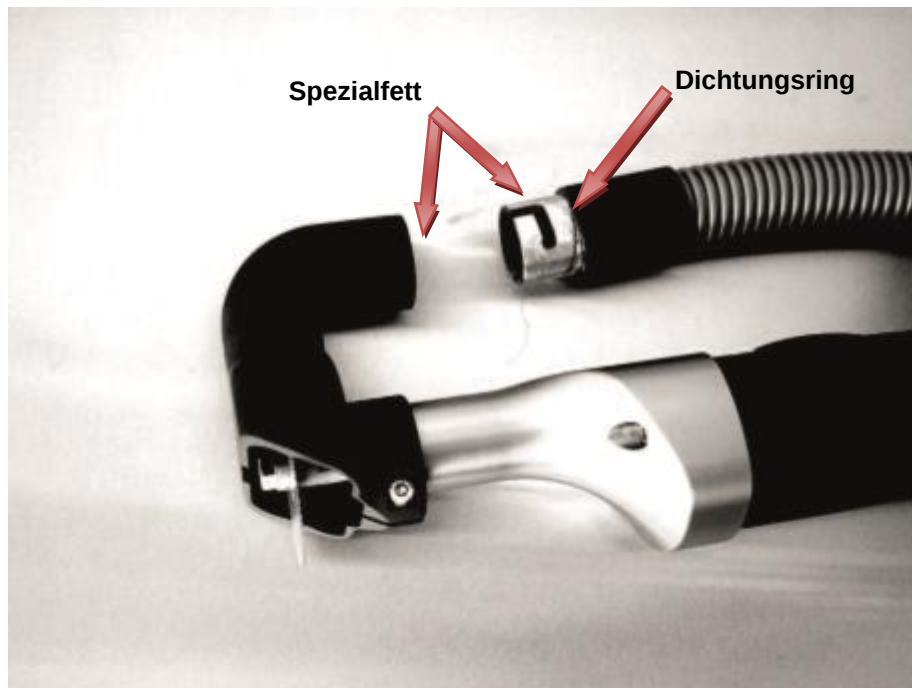

5 Zubehör / Ersatzteile

- Rundsägeblatt HB 50
- Segmentsägeblatt HB 500
- Tiefensägeblatt HB 502
- Ersatzschlüsselset für Autopsiesäge HB 740
- Kunststoffkoffer für Autopsiesäge HB 740 und Zubehör

Bedienungsanleitung

6 Gewährleistung

Für die Staubabsaugung leisten wir Gewährleistung gemäß den gesetzlichen und länderspezifischen Bestimmungen (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Die Gewährleistung beträgt 24 Monate. Im Falle von Material- oder Produktionsfehlern übernehmen wir die kostenlose Instandsetzung des Geräts. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls eigene Reparaturversuche unternommen werden.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder normale Abnutzung entstanden sind, bleiben von der Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung.

Im Gewährleistungs- und Reparaturfall legen Sie bitte dem Gerät eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins bei.

7 Umweltschutz

Führen Sie Verpackungen, ausgediente Geräte und Zubehör einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen, sondern müssen dem lokalen Entsorgungs- und Recyclingsystem für Elektrogeräte zugeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

8 Kundendienst-Adresse

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2 A
DE – 93049 Regensburg

Telefon: +49/941/208 648 - 0
Fax: +49/941/208 648 - 29
E-Mail: info@KUGEL-medical.de
Internet: www.KUGEL-medical.de



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

Wir KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Straße 2A
93049 Regensburg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Geräteart: Autopsiesäge mit Absaugung

Typenbezeichnung: HB 740, HB-740-ABS-SET

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:

Technische Vorschriften: 93/42 EWG, 2004/108/EG, ISO 14971, EN 55014-1, DIN EN ISO 15223-1, EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS), 2006/42/EG, IEC 60601-1-2, EG-Richtlinie 2011/65/EU RoHS, EGV 1907/2006, REACH:2006-12-18

Regensburg, den 02.05.2018

Unterschrift