


Formamix Formalinmisch- und dosierstation AFMDS-100

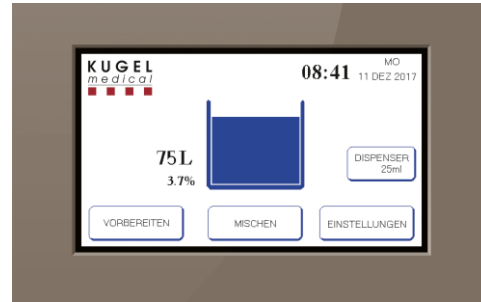

Zentrale vollautomatische Formalinmisch- und -dosierstation zum berührungsfreien Mischen von konzentrierter Stammlösung (37 %-iges Formalin) auf eine frei einstellbare gebrauchsfertige Lösung, z.B. 3,7%. Mithilfe des Mikroprozessors im Gerät können alle Aufgaben einfach über eine einzige Oberfläche am Bedienpanel mit Touch Display abgespeichert und gesteuert werden. Die Restfüllmenge und auch die darin enthaltene Formalinkonzentration werden permanent am Display angezeigt. Geben Sie nur noch die gewünschte Konzentration und Menge ein. Über den Mikroprozessor können die Einstellungen abgespeichert und wieder aufgerufen werden. Zusätzlich kann zum automatischen Probenbefüllen die Ausgabemenge auf den Milliliter genau eingestellt und über den Fußschalter ausgegeben werden – ohne Überlaufen oder Nachtropfen! Mit Schubladen zur Aufnahme von 10 / 20 Liter Kanister für Stammlösung. Die Schublade dient gleichzeitig als Sicherheitswanne.

Sämtliche Schadstoffe werden über die Aktivkohle-Filterpatrone eingesaugt und gefiltert. Optional kann die Station auch an eine bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden.

Elektronische (Akustische Warnsignale) und mechanische (Sicherheitswanne)

Sicherheitsvorkehrungen verhindern, dass die Flüssigkeiten innerhalb des Tanks überlaufen können. Die vorbereitete Mischung kann direkt an einem Hahn am Gerät oder über Druckleitungen an mehrere bis zu 200 m entfernte Abnahmestellen geleitet werden.

Die Lieferung erfolgt inklusive Trinkwasser-Filtrationssystem mit Rückspülmöglichkeit.

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical

Formamix Formalinmisch- und dosierstation AFMDS-100



Technische Details:

Bedienung:	Bedienpanel mit Touch-Display
Spannung:	230 Volt 10 Amp / 50-60 Hz
Stromanschluss:	Schukostecker
Stromverbrauch:	250 W
Wasseranschluß:	DN 15
Verwendbare Flüssigkeiten:	Formalin, Pufferlösung, destilliertes Wasser oder Trinkwasser
Sensor bei Wasserüberlauf	
Akustische Warnsignale	
Mindestmenge Standardmischung:	10 Liter
Mindestmenge frei einstellbare Mischung:	1 Liter/Mischung
Mindestrestmenge im Tank:	5 Liter
Fassungsvermögen Tank:	100 Liter (für gebrauchsfertige Lösung)
Fassungsvermögen Sicherheitswanne:	67 Liter
Maße B/T/H:	600 x 750 x 1320 mm
Eigengewicht:	100 kg
Umgebungstemperatur:	5 °C bis 45 °C
Typ:	AFMDS-100
Artikel Nr.:	099.900.196

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■